



日頃からHydrex をご愛用いただき、ありがとうございます。

皆様にご愛用頂いておりますHydrexを、ご自身の病院で治療にお使いの弊社顧問、山口醫院院長：山口貴也医師にご愛用者の皆様からのご質問について、回答頂いております。

ご愛用者様からのご質問をここに公開し、皆様にもご覧いただくことで、なお一層健康の輪を広げていけたらと考えております。ご一読いただけたら幸いです。

**山口院長へのご質問は、ハイドレックスジャパン**

TEL 03-6264-2755 FAX050-3730-7183

Mail [info@hydrex-japan.com](mailto:info@hydrex-japan.com) までどうぞ

## おしえて！ 山口先生

### 癌の術後 水素吸入はどうして良いの？

癌の手術を受けて退院しました。  
術後の回復や今後の再発予防ということで、  
水素吸入が良いと考えて続けていますが、  
どのような点で良いのか教えてください。

悪玉活性酸素が無くなると、免疫力が  
上がります。

水素吸入により、悪玉活性酸素が除去されるので、術後の免疫力を上げるために、水素吸入を続けることをお勧めいたします。

### 水素吸入で、回復と再発防止を！




水素には、  
抗炎症作用も  
あります。


そもそも人間の体内には、癌を抑制する細胞がありますが、細胞は免疫力により保たれています。

免疫力が下がり、癌を抑制する細胞が弱ってしまうと、癌が広がり、発病に至ります。

1度病を経験された方は、免疫力が下がりやすい生活習慣(食生活含む)があったとも見受けられるので、免疫力を下げないためにも、生活習慣(食生活を含む)の見直しと水素吸入の継続をお勧めいたします。

### 免疫力を上げましょう！

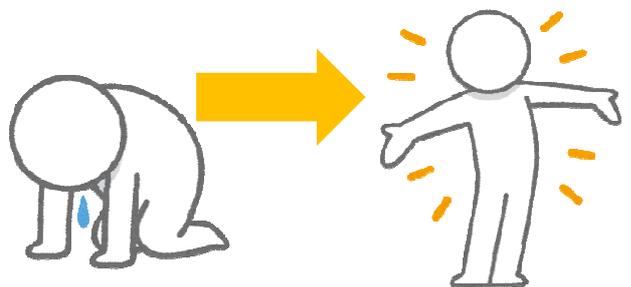

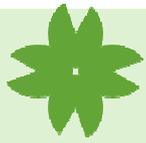

# Hydrex ユーザーの皆様

注意事項  
&  
お知らせ

ご使用方法について、納品時にご利用の手引きをお渡しいたしましたが、ユーザー様からのお問合せの多いトラブルについてお知らせすることで、もう1度思い出していただき、末永く、水素吸引をいただけたらと考え、お知らせ致します。ぜひ、ご確認をお願いいたします。

## 水不足ランプがついたから、水を500mlきちんと計って入れたのに動かない！

ランプをよく見てみると、もしかしたら、保守ランプではありませんか？450回使用すると、保守ランプが点くので、保守ランプを水不足ランプと見間違えることがよくあるようです。

ランプが点灯したら、まずは、回数計をご確認ください。回数計が450回となっていたら、点灯したランプは、保守ランプです。回数計が450回過ぎて水不足となった場合には、ランプ(水不足・保守)が2つ点灯します。

万が一、間違えてたくさん水を入れてしまい、満水ランプが点いてしまったら、まずは、03 6264-2755 ハイドレックスジャパンに お電話をお願いいたします。

何度も水を入れ過ぎ、満水ランプが点灯してしまい、その度に水を抜いている方がいらっしゃるのですが、せっかくの水素発生量が少なくなってしまうと、もったいないので、水素をしっかり発生させるため、ご説明させていただきます。



# Hydrex 第3回 勉強会

満員御礼！

「多くの病気の要因と言われる悪玉活性酸素除去を目的とした水素ガス吸引治療を取入れたわけ」

山口醫院 山口貴也院長講演会

たくさんお申込みいただき、有り難うございます。お陰様で満席となりました！

会場の関係で人数制限があり、ご参加いただけなかった皆様、申し訳ございません。勉強会の様子は、ホームページの会員ページで公開させていただきます。